



Ny  
insulinpenn

## NovoPen® 4 kan brukes med alle insuliner fra Novo Nordisk

Snakk med din lege eller sykepleier.

### Referanser:

- 1 Göke B et al. NovoPen® 4 offers superior performance, handling and acceptance compared with NovoPen® 3 in insulin-treated diabetes patients. *Diabetes Technol Ther* 2005; Apr;7(2):379.
- 2 Kolaczynski M et al. NovoPen® 4: Perceived as superior in handling and acceptance versus HumaPen® Ergo and OptiPen® Pro in patients and healthcare professionals. *Diabetes Technol Ther*. 2005; Apr;7(2):390.

Les bruksanvisningen nøye.

Novo Nordisk Scandinavia AS  
Tlf.: 67 17 85 00, Fax 67 13 09 11  
kundeservice-norge@novonordisk.com  
www.novonordisk.no  
www.diabetesinfo.no

DIA, 2. opplag © 09.06 Novo Nordisk Scandinavia AS, 10.000, Thau Reklamebyrå as

NovoPen® 4 - med sikkerheten i fokus



Ny insulinpenn



NovoPen® 4  
Et sikkert valg



NovoPen® 4  
Et sikkert valg

Se, kjenn og hør forskjellen...



# Se

3 ganger større doseskala<sup>1,2</sup>  
– lettere å se



# Kjenn

50 % mindre kraft<sup>1,2</sup>  
kreves ved injeksjon  
– halve kraften på  
doseringsknappen



# Hør

Hver dose bekreftes  
med et tydelig klikk<sup>2</sup>  
– større sikkerhet

## NovoPen<sup>®</sup>4 – ny insulinpenn med klare fordeler



Dosen kan endres ved å vri  
doseringsknappen frem og tilbake.  
Dosevalg 1-60 enheter.  
1 og 1 enhet.

Doserings-  
knapp

Stor doseskala gjør  
det lettere å se.<sup>1,2</sup>

300 enheter insulin

Restdoseskala

**Sett på en NovoFine<sup>®</sup> nål.**  
Sjekk at det kommer ut insulin.

**Doseinnstilling**  
Dra ut doseringsknappen.  
Vri doseringsknappen, hver  
enhet gir et tydelig klikk.<sup>2</sup> Dosen  
kan endres ved å vri doserings-  
knappen frem og tilbake.

**Injeksjon**  
Ved injisering trykkes doserings-  
knappen helt inn til et tydelig klikk  
høres. Vent i minimum 6 sekunder  
med nålen under huden.

Moderne design i stål. Robust, holdbar og diskret.  
Leveres i to farger, blått og sølv.